

PLAQ™ Gebrauchsanleitung

Vorbereitung

Nehmen Sie einen PlaQ Tray und legen Sie ihn auf eine hygienisch saubere Fläche. Halten Sie den Tray mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand die Siegelfolie ab. Entsorgen Sie die Folie. Legen Sie den PlaQ Tray in eine Behandlungsschale. Das Produkt ist nun gebrauchsfertig. Es kann vorkommen, dass an der Innenseite der Siegelfolie Feuchtigkeit auftritt. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Qualität und die Funktionalität des Produkts.

Klinisches Verfahren

Lassen Sie Ihren Patienten die Zähne putzen und interdental reinigen. Tragen Sie die dental plaque disclosing solution auf alle Zahnoberflächen mit dem beiliegenden speziellen Applikator auf. Lassen Sie Ihren Patienten den Mund einmal mit Wasser spülen. Vorhandener Plaque ist jetzt gefärbt. Auf diese Weise können Sie Ihrem Patienten zeigen, wo Plaque noch vorhanden ist und eine gründlichere Reinigung erforderlich ist. Der gefärbte Plaque kann einfach durch Polieren und Zähneputzen entfernt werden.

Erläuterungen

PlaQ enthält DentalColors two-tone dental plaque disclosing Flüssigkeit. Diese färbt effektiv alten Plaque (>24 Stunden) dunkellila und jüngeren Plaque rosarot. Dadurch wird Plaque sichtbar für Sie und Ihren Patienten. PlaQ zeigt Ihnen die Areale, wo gründlicheres Zähneputzen und eine bessere Dentalreinigung erforderlich ist. Ihr Patient wird somit in der Lage sein, eine gute Mundhygiene zu erreichen. PlaQ unterstützt auch, dass Kinder ein effektives Zähneputzen erlernen.

Zusammensetzung und Gebrauch

Wirkstoffe von PlaQ: D&C Red 28, gereinigtes Wasser.

CariO ist nur für den Gebrauch von Zahnärzten, Zahnhygieniker und Dentalspezialisten bestimmt.

Nicht schlucken.

Vorsichtsmaßnahmen

- Um Kreuzinfektionen zu verhindern, darf PlaQ nur während einer Behandlung benutzt und nur an einem Patienten angewendet werden (single patient use only). PlaQ ist ein Einwegprodukt.
- Sollte PlaQ Flüssigkeit mit Augen in Kontakt kommen, entfernen Sie diese sofort mit Wasser und kontaktieren Sie einen Arzt.
- Sollte PlaQ Flüssigkeit mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, reinigen Sie diese sofort mit Wasser und Seife.

Lagerung

PlaQ darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Lagern Sie es nicht unter 10° oder über 25°. Vermeiden Sie Sonnenlicht.

Garantie

- PlaQ und DENTALCOLORS sind Markenzeichen von DENTALCOLORS BV.
- DENTALCOLORS BV ersetzt alle defekten Produkte. Wir garantieren die Qualität unserer Produkte in Übereinstimmung mit den existierenden Standards.
- DENTALCOLORS BV Produkte wurden für den Einsatz in der Zahnmedizin entwickelt. Was die Anwendung der von uns gelieferten Produkte betrifft, wurden unsere mündlichen oder schriftlichen Informationen nach bestem Wissen und unverbindlich erteilt. Unsere Informationen und Hinweise entbinden Sie nicht von der Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung oder den beabsichtigten Anwendungszweck. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, ist der Anwender für diese voll verantwortlich.
- DENTALCOLORS BV Produkte dürfen ausschließlich von qualifizierten Zahnmediziner eingesetzt werden.

DENTALCOLORS BV

Kanaalstraat 235

7547 AS Enschede (NL)

T: +31-85-7732132

E: info@dentalcolors.com